

取扱説明書

製造元

 有限会社 飯田製作所

本社・工場
〒321-0168
栃木県宇都宮市東原町23番5号
TEL 028 (658) 0717 (代表)
FAX 028 (659) 2884

この度は当社製品をお買上げいただきありがとうございます。

本製品を正しく安全にご使用いただくために、この説明書は必ずお読みください。

内容をご理解いただき、記載の危険、注意事項をお守りください。

お読みいただいた後は大切に保管してください。

■ご注意■



このステッキ（棒状杖）は、**杖なしでも自立歩行できる人**が、より安定した歩行をするために**補助的に使用する**ものです。次のような方は危険が伴いますので使用しないでください。

また、ご購入後に下記の状態になられた場合も使用は中止してください。

- ・ステッキ（杖）なしでは歩行できない方（手摺などに伝わらなければ歩行できない方や介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない方など）

- ・リハビリ中などのように、**体重の一部を支えないと歩行できない方**。ただし医師などの指導のもとでの使用を含みません。

*ステッキに体重をかけすぎると肩や腰を痛める恐れがあります。また転倒などから大事故につながる危険もあります。

■ご使用上の注意事項■



ステッキ本来の使い方をしてください。

- ・ステッキはご自分の体にあったものをお選びください。
- ・ご使用前後にステッキ各部を点検してください。ステッキ本体および部品にゆがみ、亀裂または破損等が認められる場合は直ちにご使用を中止してください。
- ・ステッキは支柱の中心に荷重がかかるようグリップ全体を握ってください。
- ・先ゴムは使用しているうちに摩耗いたします。ご使用前に点検し、摩耗が認められる場合は早めに交換してください。交換した際はきちんと装着されていることをご確認ください。
 - * 先ゴムが片減りしている場合は、ステッキが正しくご使用いただけていない可能性があります。ご購入販売店にご相談ください。
- ・柔らかな地面や雨などで濡れた路面、雪道などで滑りやすい路面等では使用しないでください。止むを得ず使用する場合は十分注意し、ステッキのみに頼らず同伴者などの支えを得てください。
- ・階段を降りる時や車から降りる時はステッキに過度な力が加わります。必ず正しい持ち方でご使用ください。
- ・小石や段差のフチなどに先ゴムを乗せないでください。接地の不安定な状態でのご使用は危険です。
- ・道路側溝や凹みのある場所では杖先がはまり込む危険がありますのでご注意ください。
- ・用途以外（登山用、護身用等）には使用しないでください。

